

Ce réglet vous permettra une prise de hauteurs simple et efficace.

Il a été entièrement conçu et fabriqué en Alsace, et fait suite à notre choix en 2020 d'arrêter l'usage de verres de présentation.

MODE D'EMPLOI

1. Placez la partie basse du réglet au fond du drageoir, et les languettes hautes de part et d'autre de la monture
2. Déplacez le réglet horizontalement de manière à faire coïncider son centre avec la pupille du porteur
3. relevez la hauteur de la pupille

Pour tous conseils n'hésitez pas à contacter nos ateliers: order@clementlunetier.com ou +33(0)3.88.35.74.71

